

Leitfaden Behältersystem



1

Deckel

Behälter

Übersicht der Komponenten

2

Behälter schließen:
Deckel von oben in den Behälter legen
Wichtig: Pfeile auf dem Deckel müssen mit Punkte auf dem Behälter übereinstimmen

3

Behälter schließen:

1. Deckel mit leichtem Druck auf den Behälter drücken
2. In Pfeilrichtung den Deckel einschieben

Wichtig: Deckel ist gesichert, wenn Sie ein leises „KLACK“ hören

4

Behälter geschlossen:
Der Behälter ist dann verschlossen, wenn der Pfeil und der Punkt nicht auf derselben Höhe sind. Außerdem lässt sich der Deckel nicht mehr anheben.

5

Behälter öffnen:
Drücken Sie mit dem Daumen von unten gegen den OPEN Pfeil, bis der Deckel sich löst
Wichtig: Deckel ist geöffnet, wenn Sie ein leises „KLACK“ hören

6

Behälter öffnen:
Schieben Sie den Deckel solange, bis der Pfeil auf dem Deckel und der Punkt auf dem Behälter auf derselben Höhe sind.

7

Behälter öffnen:
Der Deckel kann nun abgehoben werden und der Behälter ist damit vollständig geöffnet

